

Gebrauchsanweisung neolexon Aphasie

Für Patient:innen



Diese Gebrauchsanweisung dient der sicheren Anwendung von neolexon Aphasie. Bitte lesen Sie sich diese Informationen genau durch und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.

Diese Gebrauchsanweisung liegt in elektronischer Form vor. Abrufbar unter:

<https://neolexon.de/aphasie-app-fuer-patienten/>

Eine Papierversion dieser Gebrauchsanweisung erhalten Sie kostenlos auf Anfrage unter info@neolexon.de – Lieferung innerhalb von 7 Tagen

Bei Fragen zum Inhalt dieser Gebrauchsanweisung oder zur Anwendung des Produkts wenden Sie sich bitte zu den auf <https://neolexon.de/> gelisteten Geschäftszeiten an unser Support-Team.

Inhalt

1. Produktbeschreibung	3
1.1 Für wen ist die neolexon Aphasie App geeignet?	3
1.2 Medizinischer Nutzen	3
1.3 Wie ist neolexon Aphasie zu verwenden?	3
1.4 Wie funktioniert neolexon Aphasie?	3
2. Kontraindikationen: Wann sollten Sie die neolexon Aphasie App nicht verwenden?	4
3. Bekannte Nebenwirkungen	5
4. Warnhinweise	5
4.1 Software Updates	5
4.2 Sicheres Passwort	5
4.3 Meldepflichten	5
Benutzung von neolexon Aphasie	6
5. Installation und Registrierung	6
6. Einloggen und mit Therapeut:in verknüpfen	6
7. Zurücksetzen des Passworts	7
8. Ändern des Passworts	7
9. Üben mit der Aphasie-App für Patient:innen	7
9.1 Wörter und Sätze	8
9.2 Texte	9
9.3 Übungsdauer	12
9.4 Texte	12
10. Zusätzliche Informationen	13
10.1 Hilfe und Support	13
10.2 Technische Voraussetzung zur Nutzung der App	13
10.3 Datenschutz und Datensicherheit	14
10.4 Symbolglossar	14
10.5 Literaturverzeichnis	15
Herstellerinformationen	16

1. Produktbeschreibung

1.1 Für wen ist die neolexon Aphasie App geeignet?

Medizinische Zweckbestimmung

neolexon Aphasie bietet eine digitale Sprachtherapie für Patient:innen mit Aphasie und/oder Sprechapraxie, die aufgrund einer neurologischen Erkrankung sprachliche Beeinträchtigungen haben. Die digitale Anwendung soll die logopädische Therapie zielgerichtet intensivieren und die sprachlichen Fähigkeiten verbessern. neolexon Aphasie ist nur anwendbar als Ergänzung zur Behandlung bei Logopäd:innen bzw. Sprachtherapeut:innen. Die Anwendung ist nicht dafür bestimmt, Informationen für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen zu liefern.

Vorgesehene Anwender:innen

neolexon Aphasie ist gedacht zur Therapie von deutschsprachigen Patient:innen ab 18 Jahren, die aufgrund einer neurologischen Erkrankung an Aphasie und/oder Sprechapraxie leiden.

1.2 Medizinischer Nutzen

neolexon Aphasie unterstützt Sie dabei, Ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, die von einer Aphasie und/oder Sprechapraxie betroffen sein können, wie Sprachverständnis, Sprechen, Lesen und Schreiben.

Die Wirksamkeit der App wurde in der AddiThA-Studie (Additive digitale Therapie bei Aphasie) nachgewiesen, diese wurde [hier](#) publiziert.

Wissenschaftliche Studien zeigen außerdem, dass für eine wirksame Aphasietherapie eine Übungsintensität von fünf bis zehn Stunden pro Woche empfohlen wird (Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, Ziegler et al., 2012). In der Praxis findet jedoch häufig nur etwa eine Stunde Sprachtherapie pro Woche statt. neolexon Aphasie ermöglicht es Ihnen, diese Lücke mit gezieltem Eigentraining zu Hause zu schließen – individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse durch Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten.

1.3 Wie ist neolexon Aphasie zu verwenden?

Wichtig: Die App neolexon Aphasie kann **nur in Kombination mit Logopäd:innen oder Sprachtherapeut:innen** verwendet werden, die ebenfalls bei neolexon registriert sind und das Eigentraining individuell einstellen. Für die Therapeut:innen entstehen zum Einstellen des Eigentrainings *keine Kosten* und sie benötigen selbst *kein Tablet*, sondern nur einen Internetzugang.

Ob das Eigentraining mit neolexon Aphasie (kurz: Aphasie-App) als Therapieergänzung geeignet ist, wird durch die behandelnden Therapeut:innen oder Ärzt:innen entschieden.

1.4 Wie funktioniert neolexon Aphasie?

neolexon Aphasie bietet digitale Sprachtherapie-Übungen in verschiedenen sprachlichen Bereichen, die von einer Aphasie und/oder Sprechapraxie betroffen sein können: Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Je nach Schweregrad der Störung kann auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen geübt werden.

Individuell angepasstes Übungsmaterial

Das Sprachmaterial, mit dem Sie in der App üben, wird von Ihrer behandelnden Logopädin oder Ihrem behandelnden Logopäden bzw. Sprachtherapeuten individuell für Sie zusammengestellt. Hierfür steht eine

Datenbank mit rund 10.000 sprachlichen Einheiten – Wörter, Sätze und Texte – zur Verfügung. Inhalte können nach Interessen und Schwierigkeit gefiltert werden, zum Beispiel nach Wortlänge oder Themenbereich. Auch die Art der Übungen wird individuell festgelegt, etwa ob Sie Lückewörter ergänzen oder mit der ganzen Tastatur schreiben. Anpassungen im Therapieverlauf sind jederzeit möglich und werden automatisch auf Ihr Gerät übertragen, sobald Sie mit dem Internet verbunden sind.

Selbstständiges Üben mit automatischer Unterstützung

Sie üben eigenständig, ohne dass eine weitere Person dabei sein muss. Die Anwendung begleitet Sie mit automatischen Hilfen und Rückmeldungen: Audiovisuelle Unterstützung – zum Beispiel Videos, in denen Wörter vorgesprochen werden – hilft Ihnen beim Üben. Unmittelbare Rückmeldungen zeigen Ihnen, ob eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde.

Übungsfortschritt verfolgen

Für je 10 Minuten Übungszeit sammeln Sie einen Stern. Eine übersichtliche Grafik in der App zeigt Ihnen Ihre wöchentliche Übungsdauer und -häufigkeit sowie Ihre erzielten Trainingserfolge auf einen Blick.

Ihre Ergebnisse können Sie jederzeit in der App einsehen. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Ihrer behandelnden Therapeutin oder Ihrem behandelnden Therapeuten teilen, damit er oder sie Ihr Eigentraining bei Bedarf anpassen kann. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie regelmäßig und in welchen Bereichen Sie üben – sie dienen jedoch nicht als Grundlage für therapeutische oder diagnostische Entscheidungen.

Therapeutische Begleitung

Die Nutzung von neolexon Aphasie ist nur in Kombination mit Logopäd:innen oder Sprachtherapeut:innen möglich, die bei neolexon registriert sind. Für die therapeutische Begleitung steht ein kostenloser Therapeuten-Account zur Verfügung. Eine Anleitung zur Einrichtung des Eigentrainings finden Therapeut:innen unter: <https://neolexon.de/therapeuten/eigentraining-einstellen/>

2. Kontraindikationen: Wann sollten Sie die neolexon Aphasie App nicht verwenden?



Die Anwendung kann nicht verwendet werden:

- bei *starken* visuellen Einschränkungen, sodass Bilder und Schrift auf einem Bildschirm nicht erfasst werden können
- bei *starken* motorischen Einschränkungen, die eine Bedienung des Tablets/Computer verhindern
- bei *starken* Höreinschränkungen, sodass auditive Vorgaben/Hilfen nicht wahrgenommen werden
- bei *starken* kognitiven Einschränkungen, die die Verwendung eines Tablets/Computers verhindern.

Sprachliche Fähigkeiten sind *nicht* Voraussetzung zum Üben. Die Anwendung wurde für Patient:innen mit Aphasie aller Schweregrade entwickelt und kann ohne sprachliche Fähigkeiten verwendet werden.

3. Bekannte Nebenwirkungen

Bisher sind keine unerwünschten Wirkungen bekannt. Falls Sie unerwartete Reaktionen bemerken, kontaktieren Sie bitte Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten und den Hersteller.

4. Warnhinweise

4.1 Software Updates



Um eine sichere und optimale Verwendung der Aphasie-App sicherzustellen, ist es empfohlen, Software-Updates zu installieren, sobald sie zur Verfügung stehen.

Unter bestimmten Umständen zeigt die App eine Meldung an, die Sie darüber informiert, dass ein obligatorisches Update durchgeführt werden muss, um sicherzustellen, dass die Anwendung vollumfänglich und effektiv genutzt werden kann. Obligatorische Updates blockieren die Nutzung der App, bis diese neue Version installiert ist.

4.2 Sicheres Passwort



Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für die Erstellung Ihres persönlichen Passworts:

- Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein.
- Verwenden Sie keine Passwörter mit drei identischen Zeichen in Folge (z. B. „aaa“).
- Benutzen Sie kein leicht zu erratendes Passwort, wie „12345678“ oder „Passwort“.
- Benutzen Sie das Passwort ausschließlich für neolexon Aphasie und nicht für weitere Zugänge bei anderen Anwendungen.
- Um Ihnen einen einfacheren Zugang zu ermöglichen, erlaubt Ihnen neolexon Aphasie das Speichern Ihres Passwortes. Wenn Sie diese Funktion verwenden, beachten Sie bitte, dass jeder mit Zugriff auf Ihr Tablet oder Laptop damit Zugriff auf Ihre in der Anwendung gespeicherten Daten hat.
- Sollten Sie den Verdacht haben, dass jemand Ihr Passwort erfahren hat, ändern Sie das Passwort umgehend.

4.3 Meldepflichten



Wenn Sie ein schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit diesem Produkt feststellen, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie wohnhaft sind:

In Deutschland ist die zuständige Behörde das BfArM. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite des BfArM: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antraege-und-Meldungen/Vorkommnis-melden/Anwender-Betreiber-Haendler/_node.html.

Wenn Sie in der Schweiz wohnhaft sind, ist die zuständige Behörde die swissmedic. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der folgenden Webseite: <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse---fsc>

[melden--materiovigilance-/anwender---betreiber.html](https://www.neolexon.de/melden--materiovigilance-/anwender---betreiber.html)

Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 definiert.

Benutzung von neolexon Aphasie

5. Installation und Registrierung

Zur Nutzung der Aphasie-App sind die folgenden Schritte notwendig:

1. Laden Sie sich die Aphasie-App auf Ihr **Tablet** herunter. Geben Sie hierzu einfach „neolexon Aphasie“ in das Suchfeld im Play-Store (Android Tablets) oder App-Store (iPads) auf dem Tablet ein und installieren Sie die App. Wenn Sie kein Tablet besitzen, können Sie alternativ unsere [Browser-Version](#) am Computer oder Laptop nutzen.
2. Registrieren Sie sich in der App bzw. in der [Browser-Version](#) der Aphasie-App mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Ab jetzt startet Ihre kostenlose 14-tägige Testphase, in der sich Ihr:e Therapeut:in mit Ihrem Gerät verknüpfen und Ihr Eigentraining einstellen kann. Hierfür geben Sie einfach Ihren persönlichen Patienten-Code an Ihren Therapeuten oder Ihre Therapeutin weiter. Der Code wird Ihnen direkt nach der Anmeldung angezeigt (weitere Infos unter Punkt 6).
3. Im Menü rechts oben (Zahnradsymbol) schalten gesetzlich Versicherte die App mittels Rezeptcode der Krankenkasse für 90 Tage kostenlos frei. Klicken Sie hierfür einfach auf „Rezeptcode einlösen“. Alternativ kann von privat Versicherten/Selbstzahlern die gewünschte Lizenzdauer der Aphasie-App im [persönlichen Account](#) auf unserer Webseite kostenpflichtig gebucht werden.

6. Einloggen und mit Therapeut:in verknüpfen

- Mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort können Sie sich in die Aphasie-App auf dem Tablet oder am Computer über aphasie.neolexon.de einloggen.
- Hier erhalten Sie Ihren persönlichen Patienten-Code. Geben Sie diesen Code an Ihren Therapeuten bzw. Ihre Therapeutin weiter. Ihr:e Therapeut:in trägt den Code im eigenen Therapeuten-Account ein. Dadurch sind Sie mit diesem verknüpft.
- Ihren Patienten-Code können Sie auch jederzeit in der App einsehen.
- Wenn Sie den Therapeuten oder die Therapeutin wechseln, übergeben Sie den Code an Ihre:n neue:n Therapeuten bzw. Therapeutin. Sobald diese:r den Code bei sich im Therapeuten-



Account einträgt, wird die Verbindung zum vorhergehenden Therapierende:n automatisch gelöscht.

- Ihr:e Therapeut:in wählt für Sie nun individuelles Übungsmaterial aus einer großen Datenbank aus und stellt die passende Schwierigkeit ein. Die Übungen werden über das Internet automatisch in die Aphasie-App auf Ihrem Gerät geladen.
- Wenn Ihr:e Therapeut:in neue Übungen im Verlauf der Therapie schickt, empfangen Sie diese automatisch, sobald Sie mit dem Internet verbunden sind und die App öffnen.

7. Zurücksetzen des Passworts

- Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen?“
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei neolexon Aphasie registriert haben und klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“
- Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts. Öffnen Sie den Link, um Ihr neues Passwort einzugeben.

8. Ändern des Passworts


- Klicken Sie im Menü rechts oben (Zahnradsymbol) auf „Mein Benutzerkonto“.
- Wählen Sie „Passwort ändern“.
- Geben Sie Ihr aktuelles Passwort sowie das neue Passwort zweimal zur Bestätigung ein.
- Klicken Sie anschließend auf „Passwort ändern“, um die Änderung zu speichern.

9. Üben mit der Aphasie-App für Patient:innen

- Auf der Startseite wählen Sie ein Übungsset aus, indem Sie ein Häkchen setzen. Klicken Sie dann auf „weiter“.



- Auf der nächsten Seite wählen Sie eine oder mehrere Übungen aus, indem Sie ein Häkchen setzen. Mit Klick auf „Start“ beginnt das Training.

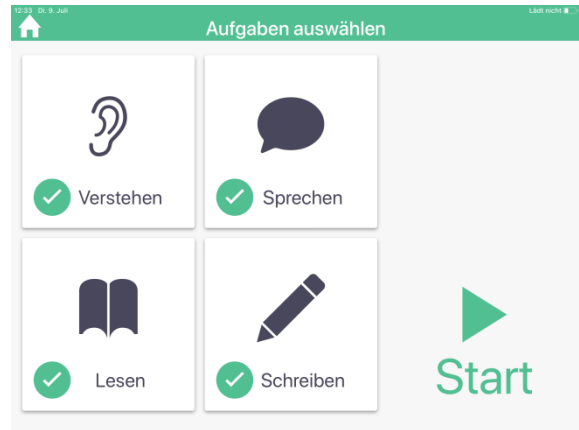


9.1 Wörter und Sätze

Übung „Verstehen“

- Bei der Übung **„Verstehen“** sehen Sie mehrere Bilder (2 bis 4 Bilder möglich). Es wird Ihnen ein Wort oder ein Satz vorgesprochen und Sie sollen das dazu passende Bild anklicken. Mit Klick auf das Fragezeichen können Sie sich das Wort oder den Satz erneut anhören.


Übung „Lesen“

- Bei der Übung **„Lesen“** sehen Sie mehrere Bilder (2 bis 4 Bilder möglich). Daneben ist ein Wort oder ein Satz geschrieben und Sie sollen das dazu passende Bild anklicken. Mit Klick auf das Fragezeichen können Sie sich das Wort oder den Satz vorsprechen lassen.

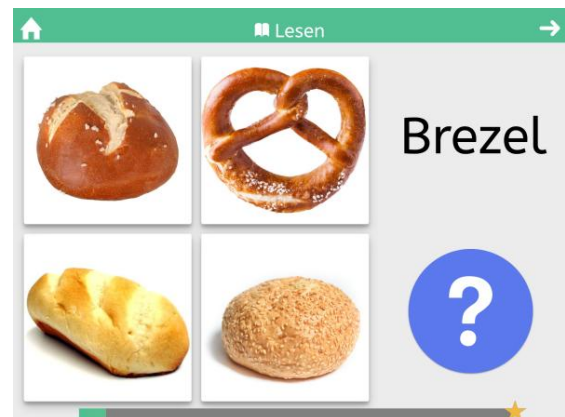

Übung „Sprechen“


- Bei der Übung **„Sprechen“** sehen Sie ein Bild. Dieses Bild sollen Sie benennen. Eventuell hat Ihre Therapeut:in die Mikrofon-Funktion für Sie aktiviert und Sie können sich selbst aufnehmen. Klicken Sie dazu auf das Mikrofon-Symbol und benennen Sie das Bild. Stoppen Sie dann die Aufnahme mit erneutem Klick auf das Mikrofon-Symbol.
- Sie können sich Ihre Aufnahme über das Abspiel-Symbol anhören. Über das Mikrofon-Symbol können Sie dann ggf. eine erneute Aufnahme starten. Bewerten Sie sich anschließend mit einem der drei Daumen, wie gut Sie das Bild benannt haben.

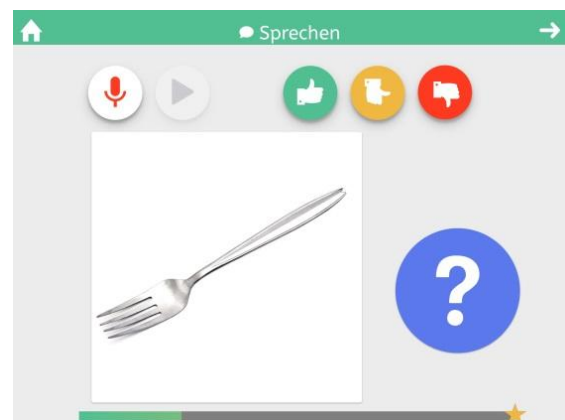

- Über das Fragezeichen können Sie sich das Wort oder den Satz vorsprechen lassen.

Übung „Schreiben“


- Bei der Übung **„Schreiben“** sehen Sie ein Bild und sollen das Wort oder den Satz dazu schreiben. Hier hat Ihr:e Therapeut:in die passende Schwierigkeit (Lückenwort/-satz, Buchstaben-Puzzle oder ganze Tastatur) für Sie ausgewählt. Tippen Sie die korrekten Buchstaben der Reihe nach an und schreiben so das Wort oder den Satz in der oberen Leiste. Über das Fragezeichen können Sie das geschriebene Wort oder den Satz kurz anschauen.

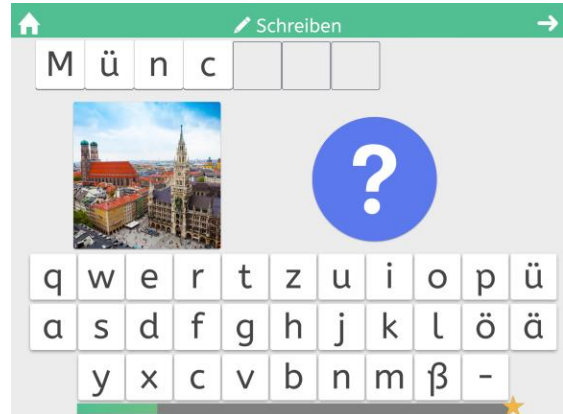



9.2 Texte

Übung „Verstehen“

- Bei der Übung **„Verstehen“** wird Ihnen zunächst ein Text vorgesprochen. Über das Pause- und Play-Symbol können Sie die Tonaufnahme pausieren und wieder starten. Über den Regler können Sie die Aufnahme vor- und zurückspulen. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

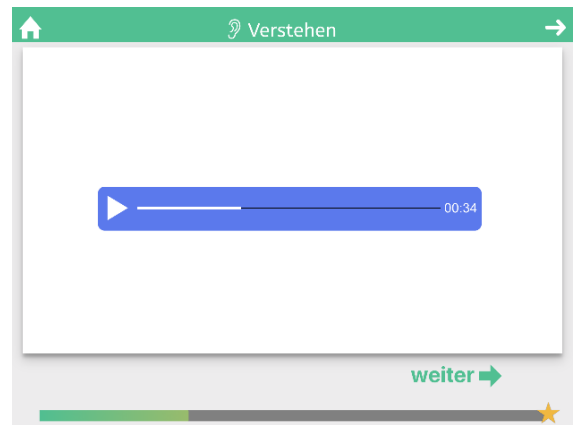


- Dann wird Ihnen der Anfang eines Satzes vorgesprochen. Wählen Sie die richtige Satzfortsetzung aus 2 bis 4 Antwortmöglichkeiten aus. Eventuell hat Ihr:e Therapeut:in offene Fragen eingestellt, sodass Sie die Antworten selbst aufnehmen. Klicken Sie dazu auf das Mikrofon-Symbol und beantworten Sie die Frage. Stoppen Sie dann die Aufnahme mit erneutem Klick auf das Mikrofon-Symbol.

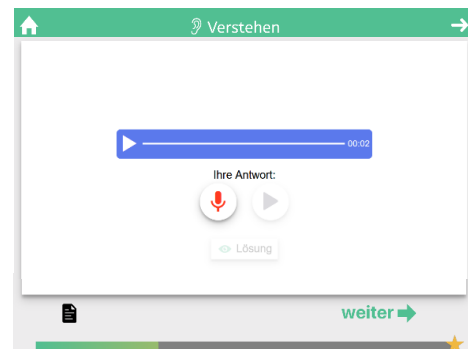
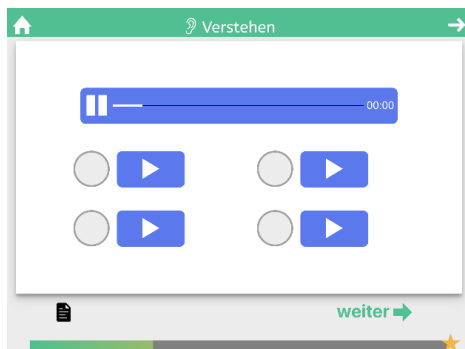


Übung „Lesen“

- Bei der Übung „Lesen“ sehen Sie einen Text, den Sie gründlich durchlesen. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

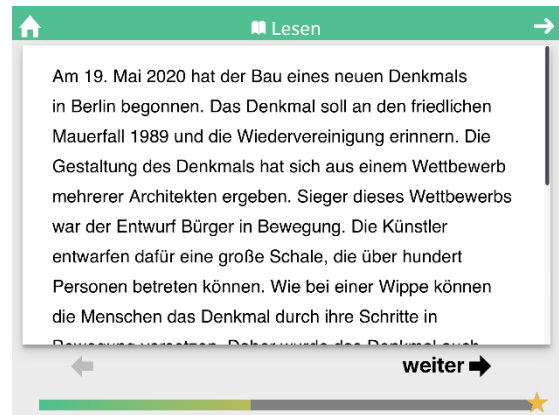


- Dann wird Ihnen der Anfang eines Satzes angezeigt. Wählen Sie die richtige Satzfortsetzung aus 2 bis 4 Antwortmöglichkeiten aus. Eventuell hat Ihr:e Therapeut:in offene Fragen eingestellt, sodass Sie die Antworten selbst aufnehmen. Klicken Sie dazu auf das Mikrofon-Symbol und beantworten Sie die Frage. Stoppen Sie dann die Aufnahme mit erneutem Klick auf das Mikrofon-Symbol.

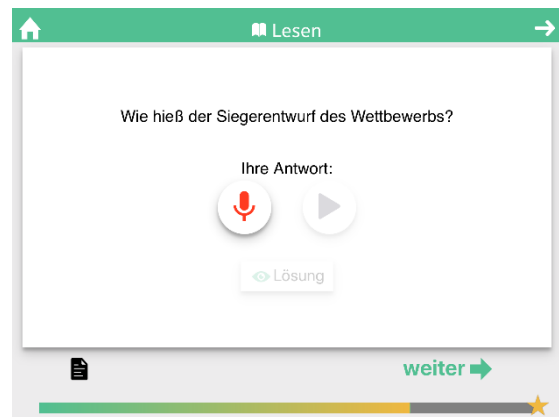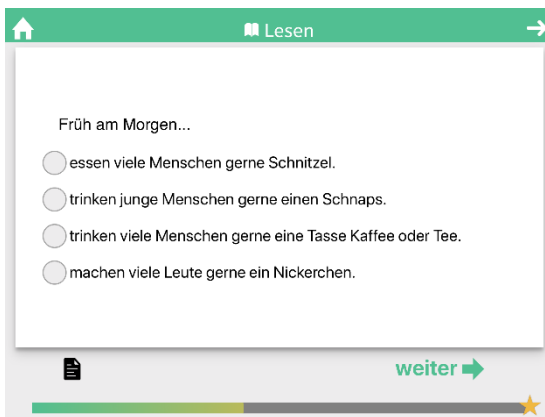

Übung „Sprechen“

- Bei der Übung „Sprechen“ sehen Sie einen Text, den Sie gründlich durchlesen. Sie können sich den Text auch vorlesen lassen, indem Sie auf das Play-Symbol klicken. Über das Pause- und Play-Symbol können Sie die Tonaufnahme pausieren und wieder starten. Über den Regler können Sie die Aufnahme vor- und zurückspulen. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

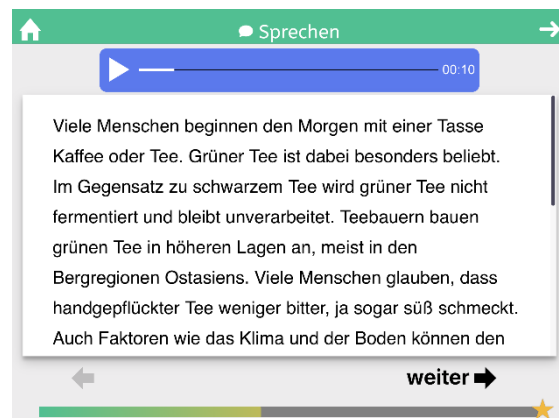


- Dann wird Ihnen eine Frage angezeigt, die Sie sich auch vorlesen lassen können, indem Sie auf das Play-Symbol klicken. Nehmen Sie die Antwort auf. Klicken Sie dazu auf das Mikrofon-Symbol und beantworten Sie die Frage. Stoppen Sie dann die Aufnahme mit erneutem Klick auf das Mikrofon-Symbol.





Übung „Schreiben“

- Bei der Übung „Schreiben“ sehen Sie einen Lückentext. Tippen Sie die korrekten Wörter der Reihe nach an.

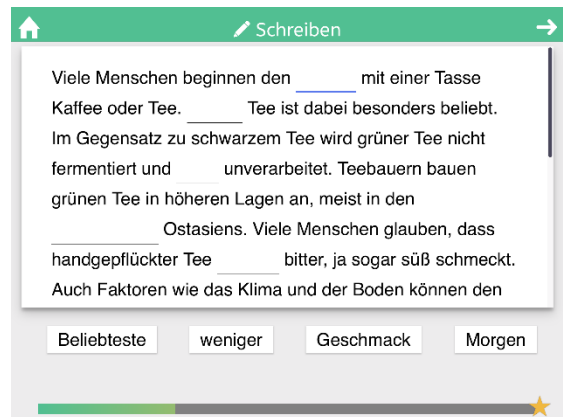

- Wenn Ihr:e Therapeut:in das Diktat für Sie ausgewählt hat, wird Ihnen in der Übung „Schreiben“ ein Text vorgesprochen, den Sie mitschreiben. Über das Pause- und Play-Symbol können Sie die Tonaufnahme pausieren und wieder starten. Über den Regler können Sie die Aufnahme vor- und zurückspulen. Klicken Sie anschließend auf „fertig“.

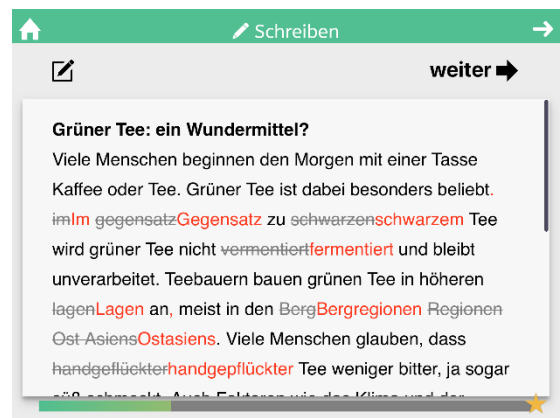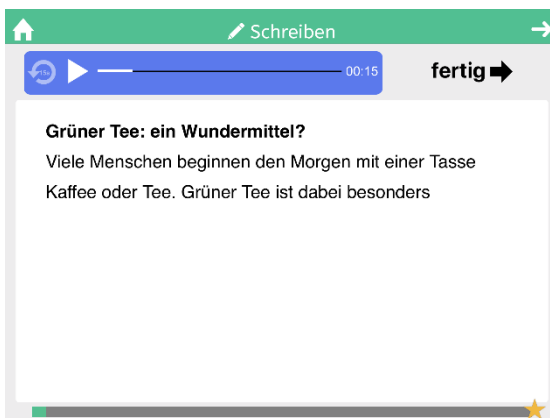

9.3 Übungsdauer

- Ihr:e Therapeut:in kann optional für Sie ein Tagesziel festlegen. Dann erarbeiten Sie sich alle 10 Minuten einen Stern. Sie sehen dann auch, ob noch Sterne leer sind und das Tagesziel somit noch nicht erreicht wurde. Zusätzliche Sterne, die über das Tagesziel hinausgehen, können selbstverständlich auch erarbeitet werden. Auf Grundlage wissenschaftlicher Studien empfehlen wir eine Übungsdauer von mindestens 40 Minuten pro Tag, um die von der neurologischen Behandlungsleitlinie empfohlene Gesamtdauer der Therapie von 5 bis 10 Stunden pro Woche zu erreichen.
- Ihre Übungsdauer wird in Form von gesammelten Sternen angezeigt. Mit Klick auf den Stern auf der Startseite wird Ihnen eine Wochenübersicht angezeigt. Ein Stern in der Wochenübersicht bedeutet 10 Minuten Training.




9.4 Texte

- Während Sie zuhause mit der Aphasie-App üben, wird aufgezeichnet, was Sie üben und ob Sie eine Aufgabe richtig, fast oder falsch gelöst haben. Diese Aufzeichnungen können Sie in der Aphasie-App sowohl auf dem Tablet als auch in der Browser-Version anschauen. Wichtig: Die Ergebnisse geben Einblick, wie oft Sie üben, was Sie üben und wie gut das Eigentaining allgemein klappt. Sie liefern keine Informationen für therapeutische Entscheidungen. Die Informationen sind daher für Therapeut:innen für das Einstellen des Eigentrainings nicht notwendig.
- Um die Ergebnisse anzuschauen, klicken Sie in Ihrer Aphasie-App auf das Zahnradsymbol, und anschließend auf „Ergebnisse ansehen“. Als nächstes wählen Sie ein aktives Übungssets aus und bekommen die Aufzeichnungen angezeigt.



- In der Browser-App können die Ergebnisaufzeichnungen zudem an dieser Stelle als Bild-Datei (PNG-Format) heruntergeladen werden. Dazu klicken Sie oben rechts auf „herunterladen“.

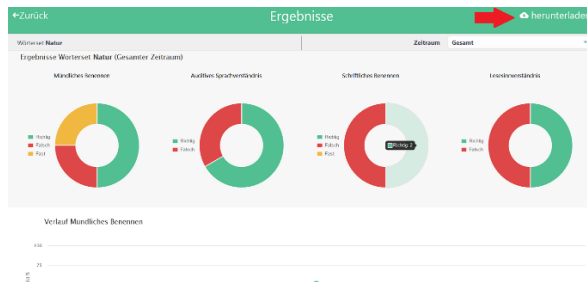

- Um die Ergebnisse freizugeben, können Sie den Regler „Ergebnisse mit dem verbundenen Therapeuten-Account teilen“ jederzeit aktivieren. Ihr:e Therapeut:in kann dann die Aufzeichnungen der aktiven Übungssets im Therapeuten-Account sehen. Die Freigabe können Sie jederzeit wieder deaktivieren.

10. Zusätzliche Informationen

10.1 Hilfe und Support

Bei technischen oder inhaltlichen Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an uns!

Unser Support-Team ist zu den unter <https://neolexon.de/> angegebenen Zeiten erreichbar per E-Mail unter info@neolexon.de oder per Telefon unter **089 24886 4440**.

10.2 Technische Voraussetzung zur Nutzung der App

Um die neolexon Aphasie-App nutzen zu können, benötigen Sie eine persönliche E-Mail-Adresse, ein Tablet (iOS oder Android) oder einen Computer. Die App läuft **nicht auf Smartphones**.

Die technischen Voraussetzungen sind:

- mindestens 2 GB Arbeitsspeicher
- mindestens 1 GB freier Speicherplatz wird benötigt
- Betriebssystem Tablets:
 - Android: Minimum Android 8
 - Apple: Minimum iOS 15.1
- Browser Laptop, PC oder anderen Tablets wie z.B. Windows, Amazon oder Huawei:
 - Mozilla Firefox (in der jeweils aktuellsten Version)
 - Google Chrome (in der jeweils aktuellsten Version)
- Internetzugang:
 - Für ein reibungsloses Herunterladen sollte die Download-Geschwindigkeit des Internets 4 Mbit/s nicht unterschreiten. Die Geschwindigkeit Ihres Internets können Sie über kostenlose Speedtests im Internet prüfen.
 - Für ein reibungsloses Herunterladen sollte die Download-Geschwindigkeit des Internets 4 Mbit/s nicht unterschreiten. Die Geschwindigkeit Ihres Internets können Sie über kostenlose Speedtests im Internet prüfen.

Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Voraussetzungen mit neuen Versionen des Medizinprodukts ändern können.

10.3 Datenschutz und Datensicherheit

Ihre Daten werden auf Ihrem Gerät als auch auf unseren Servern in der Open Telekom Cloud bei der Telekom Deutschland GmbH gespeichert, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Dadurch sind Ihre Daten auch bei Verlust oder Beschädigung Ihres Tablets oder Computers gesichert.

Ausführliche Informationen zu Ihren Datenschutzrechten und unseren Datenschutzmaßnahmen finden sich unter: <https://neolexon.de/datenschutzerklaerung/>

Sollten Sie Fragen zum Thema Datenschutz, zur Verarbeitung Ihrer Daten oder zur Wahrung Ihrer Betroffenenrechte haben, erreichen Sie uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter:

datenschutz@neolexon.de oder telefonisch unter der +49 30 327 657 51

Falls Sie eine schriftliche Anfrage stellen wollen genügt der Zusatz „Datenschutz“.

Externer Datenschutzbeauftragter: Fresh Compliance GmbH
vertreten durch Frank Trautwein
Schönhauser Allee 43a
10435 Berlin

10.4 Symbolglossar



Beachten Sie bitte die elektronische Gebrauchsanweisung.



Achtung



CE-Kennzeichnung
neolexon Aphasie entspricht den anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich.
Medizinprodukt



neolexon Aphasie ist ein Medizinprodukt der Klasse I nach Regel 11 der Verordnung (EU) 2017/745.



Herstellungsdatum



Hersteller



Dieses Produkt ist für die wiederholte Nutzung durch dieselbe Person bestimmt



Bevollmächtigter in der Schweiz



Importeur

10.5 Literaturverzeichnis

Lehner, K, Ziegler, W, Leicht, K, et al. (2025). Therapie-App auf Rezept bei Aphasie. Forum:logopädie, 39(4), 30-35

Ziegler W, Ackermann H, Goldenberg G, et al. Rehabilitation aphasischer Störungen nach Schlaganfall. Leitlinie der DGN. 2012

Herstellerinformationen



Limedix GmbH
Lazarettstraße 4
80636 München
Deutschland

Geschäftsführerinnen: Dr. Hanna Jakob, Dr. Mona Späth
Amtsgericht München, HRB 262822
UID-Nummer: DE815899944

Stand der Software

Die aktuelle Software-Version und das Veröffentlichungsdatum von neolexon Aphasie entnehmen Sie bitte der Startseite der Anwendung.

Stand der Information

2026-04-07

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die neolexon Aphasie Software Version 1.10.30 und höher, solange keine neuere Version der Gebrauchsanweisung erstellt wird.



Inspira GmbH
Thunstrasse 64
3110 Münsingen
Schweiz